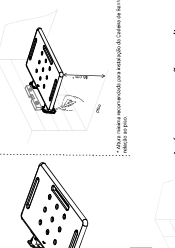
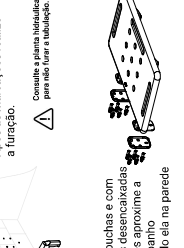
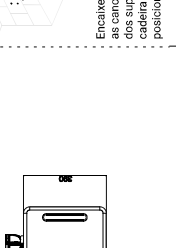
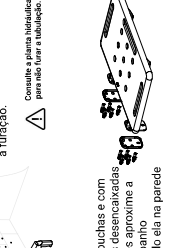


MS2215

7920431A - Folheto de Instalação Cadeira de Banho Conforto - 2356.I.POL.N - 2356.BL.MT

<p>AGRADECIMENTO</p> <p>Obrigado por escolher a marca Deca. Você acaba de adquirir um produto que expressa a nossa busca por design, inovação, tecnologia e qualidade. Acreditamos que este produto esteja alinhado com a sua confiança em relação a nossa marca.</p> <p>AVISO: Leia atentamente as informações de instalação antes de instalar o produto. Guarde este manual para futuras consultas.</p>	<p>3. SISTEMAS DE FIXAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none">Concreto ou Tijolo Maciço: Solução: utilizar parafusos cabeça sextavada com bucha de nylon de diâmetro 10mmTijolo Furado, Madeira, Concreto Celular, Chapa Metálica e Placa de Gesso: Consulte o engenheiro e/ou arquiteto responsável pela obra para a verificação de resistência da parede e indicação da fixação adequada.	<p>1. INTRODUÇÃO:</p> <p>A união de conforto e segurança para o seu banheiro. Em certos momentos da vida, precisamos mais do que beleza e funcionalidade. Precisamos de segurança e conforto. A linha Deca Bancos e acessórios Deca Conforto que afirma uma única linha: funcionalidade, robustez, segurança e conforto, além da incomparável qualidade Deca. Suas peças confeccionadas em aço inox, sem emendas, suportam 150kg (em condições adequadas de instalação), comprovando a qualidade dos produtos Deca.</p>
<p>2. INSTALAÇÃO:</p> <p>ATENÇÃO: Os parafusos e buchas que acompanham o produto devem ser utilizados apenas em paredes de concreto ou tijolo maciço. Caso contrário, entre em contato com engenheiro e/ou arquiteto responsável pela obra, para que o mesmo identifique o tipo de parede onde será instalado o acessório e indique a fixação adequada e segura para a instalação.</p>	<p>PASSO 1:</p> <p>Realize a montagem da base na flange de fixação do assento. Após isso posicione a Cadeira de Banho no local da instalação desejado e com o auxílio do nível, ajuste a angulação adequada e faça as marcações dos furos.</p> 	<p>PASSO 2:</p> <p>Encasque as buchas e com as canoplas desencasqueadas, aproxime a cadeira de banho posicionando-a na parede.</p> 
<p>PASSO 3:</p> <p>Após a fixação das buchas rosqueie os parafusos com uma chave adequada (não acompanha o produto).</p> <p>Por último encaixe as canoas nos suportes.</p> 	<p>Após as marcações realize a furatura.</p> <p>Consulte a planta hidráulica para não furar a tubulação.</p> 	<p>4. DIMENSÕES:</p> 